



Verwendungszweck:

Das MPS2 Verriegelungsblock-Umrüstset ist für den Austausch der MPS2 Verriegelungsblockeinheit mit der Verriegelungsblockeinheit des MPS2 10-16 Wärmetauschers (HEX) mit Windungen indiziert.

Gegenanzeigen:

Dieses Gerät ist für die Verwendung mit der MPS2-Konsole und den Einmalprodukten von Quest konzipiert. Die Verwendung mit anderen Systemen ist kontraindiziert. Diese Vorrichtung wurde ausschließlich für ihren Verwendungszweck konzipiert und ist ausschließlich für diesen zu verkaufen und bestimmungsgemäß zu verwenden.

Warn- und Vorsichtshinweise:


1. Lesen Sie die Anweisungen sorgfältig durch. Der behandelnde Arzt trägt die alleinige Verantwortung für den Aufbau und die Verwendung des Geräts. Die vollständigen Gebrauchsanweisungen finden Sie im Handbuch für das MPS-System.
2. NUR zum Gebrauch mit der MPS-Konsole gedacht. NICHT für andere Zwecke verwenden. Alle Ansprüche erlöschen bei separater Verwendung.
3. Öffnen Sie die drei Verpackungen und prüfen Sie den Inhalt auf Versandschäden. KEINE beschädigten Komponenten verwenden.
4. Die Schutzsteckdose oder die geeignete Steckdose sollte ordnungsgemäß geerdet sein.
5. Laut dem US-amerikanischen Bundesgesetz darf diese Vorrichtung nur durch einen Arzt oder im Auftrag eines Arztes verkauft werden.
6. Alle zusätzlichen in der nachfolgenden Gebrauchsanweisung enthaltenen Warnungen und Vorsichtshinweise befolgen.

Montageanleitung

1. WICHTIG: Vor der Montage die Wasserschläuche abklemmen, um das Auslaufen größerer Wassermengen während des Austauschs zu vermeiden.



2. Die vier Schrauben entfernen, die die Verriegelungsblockeinheit am HEX-Block sichern. Die Verriegelungsblockeinheit entfernen.

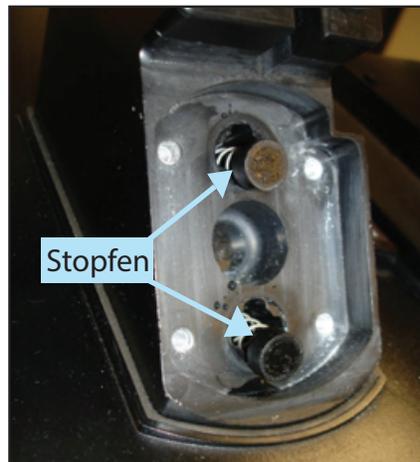

3. Sicherstellen, dass die Stopfen auf den Federn verbleiben.



4. Sicherstellen, dass sich die Stopfendichtungen über den kreisförmigen Aussparungen der neuen Verriegelungsblockeinheit befinden.

For symbols glossary visit www.questmedical.com/resources.aspx



EMERGO EUROPE
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

One Allentown Parkway | Allen, Texas 75002 U.S.A. | +1 972 390-9800 | +1 800 627-0226
©2019 Quest Medical, Inc. MPS ist ein eingetragenes Warenzeichen von Quest Medical, Inc. MPS-Konsole und MPS Sterile Einmalprodukte sind durch ein oder mehrere der nachfolgenden US-Patente geschützt:
5,573,502 - 5,588,816 - 5,638,737 - 5,645,531 - 5,899,873.

Sie sind außerdem durch ausstehende US-amerikanische und internationale Patentanmeldungen und Patentanträge geschützt.

Hergestellt in den USA
904517 REV B
JUNE 19



5. Die neue Verriegelungsblockeinheit über die Stopfen platzieren. Die Stopfen mit den im HEX-Block bereitgestellten Bohrungen ausrichten und dabei eine Gefäßklemme zum Zusammendrücken der Federn verwenden.



6. Die Verriegelungsblockeinheit eindrücken, während beide Stopfen ausgerichtet bleiben. Die Verriegelungsblockeinheit sollte bündig mit der Unterseite des Wärmetauscherblocks abschließen. Die Stopfen sollten mit den Stopfendichtungen abschließen.



7. Die Verriegelungsblockeinheit halten und die vier Schrauben ersetzen. Jede Schraube fest anziehen.

8. Die Wasserleitungen wieder anschließen und die Schlauchklemmen entfernen.

For symbols glossary visit www.questmedical.com/resources.aspx



EMERGO EUROPE
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

Zum Wechsel auf die Position 16 Windungen im Wärmetauscher



Mit der entriegelten Position 10 C beginnen.



1. Den Knopf nach unten drücken und gegen den Uhrzeigersinn um 360 Grad bis zum Anschlag drehen. (Der Verriegelungsknopf wird abstehen)



2. Der Knopf befindet sich nun in der entriegelten Position 16 Windungen.

Zum Wechsel die Position 10 Windungen im Wärmetauscher



Mit der entriegelten Position 16 C beginnen.



1. Den Knopf nach unten drücken, den Knopf 360 Grad im Uhrzeigersinn drehen, bis er einrastet.



2. Die Vertiefungen auf den zwei Teilen des Knopfs sollten nun ausgerichtet sein.



3. Der Knopf befindet sich nun in der entriegelten Position 10 Windungen.

Falls Sie Probleme haben, einen Wärmetauscher zu verriegeln, dann stellen Sie sicher, dass sich der Verriegelungsblock in der korrekten Konfiguration für das von Ihnen zu montierende Einwegset befindet. Bitte lesen Sie die mit dem Einwegset mitgelieferte Gebrauchsanweisung zur Montage des Einwegsets. Wenn Sie diese Gebrauchsanweisung nicht länger als Referenz benötigen, dann bringen Sie diese auf der Rückseite des MPS-Handbuchs an.

For symbols glossary visit www.questmedical.com/resources.aspx



EMERGO EUROPE
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands