

Destinazione d'uso:

L'unità di bloccaggio MPS2 è indicata per facilitare l'installazione e l'utilizzo di uno scambiatore di calore a convoluzione 10 o di un scambiatore di calore a convoluzione 16.

Controindicazioni:

Questo dispositivo è progettato per l'utilizzo con la console e i prodotti monouso Quest MPS2. L'uso con altri sistemi è controindicato. Questo dispositivo non è progettato, venduto o inteso per un uso diverso da quello indicato.

Avvertenze e precauzioni:

1. Leggere attentamente le istruzioni. Il medico curante è il solo responsabile della configurazione e dell'utilizzo di questo dispositivo. Per le istruzioni d'uso complete, consultare il Manuale per le operazioni del sistema MPS.
2. Da utilizzare ESCLUSIVAMENTE con la console MPS. NON UTILIZZARE per altri scopi. In caso di utilizzo separato, tutti i reclami saranno considerati nulli.
3. Disimballare le tre confezioni e verificare che non siano state danneggiate durante la spedizione. NON UTILIZZARE i componenti danneggiati.
4. La presa di corrente di tipo ospedaliero, o quella propriamente dell'ospedale, deve avere una corretta messa a terra.
5. La legge federale (Stati Uniti) limita la vendita di questo dispositivo ai medici o su prescrizione medica.
6. Osservare tutte le avvertenze e precauzioni aggiuntive contenute nelle Istruzioni per l'uso seguenti.

Attivazione verso la posizione dello scambiatore di calore a convoluzione 16

Iniziare dalla posizione aperta 10 C.



1. Spingere la manopola verso il basso e ruotarla in senso antiorario di 360 gradi finché smette di ruotare. (La manopola di bloccaggio si estenderà verso l'esterno)



2. La manopola si troverà nella posizione aperta a convoluzione 16.

(VOLTARE PAGINA)

For symbols glossary visit www.questmedical.com/resources.aspx



One Allentown Parkway, Allen, Texas 75002 USA
+1.972.390.9800 | +1.800.627.0226 | F +1.972.390.8465

© 2019 Quest Medical, Inc. MPS is a registered trademark of Quest Medical, Inc. The MPS Console and MPS sterile disposables are covered under one or more of the following U.S. patents: 5,573,502 . 5,588,816 . 5,638,737 . 5,645,531 . 5,899,873. Also covered by pending U.S. and International Patents and patent applications.



EMERGO EUROPE
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

Made in USA
904522 REV B
JUNE 19

Attivazione verso la posizione dello scambiatore di calore a convoluzione 10



Iniziare dalla posizione aperta 16 C.



1. Spingere verso il basso la manopola, ruotarla di 360 gradi in senso orario finché non si avverte uno scatto.



2. Ora i rientri arrotondati dei due pezzi della manopola dovrebbero essere allineati.



3. La manopola si troverà nella posizione aperta a convoluzione 10.

- In caso di problemi con il bloccaggio di uno scambiatore di calore, assicurarsi che l'unità si trovi nella configurazione corretta per il kit monouso che si desidera installare.
- Fare riferimento alle istruzioni per l'uso fornite con il kit di installazione dei prodotti monouso.
- Una volta terminato l'utilizzo di questo manuale di istruzioni, si prega di allegarlo al retro del Manuale Operativo MPS.
- Codice prodotto: 5161102 Kit per la somministrazione di soluzione a convoluzione 16

For symbols glossary visit www.questmedical.com/resources.aspx



One Allentown Parkway, Allen, Texas 75002 USA
+1.972.390.9800 | +1.800.627.0226 | F +1.972.390.8465

© 2019 Quest Medical, Inc. MPS is a registered trademark of Quest Medical, Inc. The MPS Console and MPS sterile disposables are covered under one or more of the following U.S. patents: 5,573,502 . 5,588,816 . 5,638,737 . 5,645,531 . 5,899,873. Also covered by pending U.S. and International Patents and patent applications.



EMERGO EUROPE
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

Made in USA
904522 REV B
JUNE 19